

## Inhaltsverzeichnis:

1. Start der Therapie
2. Beenden der Therapie
3. Änderungen der Zufuhreinstellungen
4. Handhabung mit dem Akku



CADD-Solis VIP Pumpe –  
Bildquelle: [www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

Medipro Ärztebedarf GmbH  
Alois-Senefelder-Str. 2  
68167 Mannheim

Tel.: +49 621 3098096-0  
Fax: +49 621 3098096-55  
Mail: [info@medipro-mannheim.de](mailto:info@medipro-mannheim.de)

## 1. Start der Therapie – Handlungsablauf

- ✦ Drücken Sie den grauen Netzschalter auf der rechten Außenseite der Pumpe um das Gerät einzuschalten. Nach einem akustischen Signal hat die Pumpe ihren Selbsttest beendet und ist startbereit.
- ✦ Schließen Sie das CADD Infusionsset an die Pumpe an wie im Folgenden beschrieben:
  - a) Öffnen Sie den silberfarbenen Kassettenbügel auf der rechten Seite.
  - b) Klemmen Sie die Haken der Kassette auf der Unterseite der Pumpe ein und drücken Sie diese an, bis ein Einrasten spürbar ist.
  - c) Schieben Sie anschließend den Kassettenbügel wieder nach oben um das System zu befestigen.
  - d) System mittels Einstichdorn am Ernährungsbeutel anbringen.
- ✦ Es erscheint nun die Anzeige „Reservoir Inhalt zurückstellen auf VOLUMEN in ml“, wählen Sie „Ja“
- ✦ Es erscheint die Anzeige „Schlauch vorfüllen“, wählen Sie „Ja“
- ✦ Es erscheint die Anzeige „Zum Fortfahren Code eingeben“, geben Sie den Code 212 mit den Pfeiltasten auf dem Bedienfeld ein. (Jede Zahl nach Auswahl mit „wählen“ bestätigen)
- ✦ Es erscheint die Anzeige „Schläuche vom Pat. abtrennen, Klemmen öffnen. Dann Vorfüllen drücken“, wählen Sie nun „Vorfüllen“
- ✦ Um den Entlüftungsvorgang zu beenden wählen Sie „Vorfüllen stoppen“, anschließend erscheint die Anzeige „Vorfüllen fortsetzen?“, hier wählen Sie „Nein“ sofern das System komplett entlüftet ist.
- ✦ Es erscheint die Anzeige „Pumpe starten“, wählen Sie „Ja“ um die Therapie zu starten.
- ✦ Die Pumpe ist nun im Therapiemodus; auf der Anzeige im Display mittig sehen Sie nun die Rest Zeit und im oberen linken Bereich das Restvolumen.

## 2. Beenden der Therapie – Handlungsablauf

- ☛ Um die Pumpe zu stoppen drücken Sie die rot/grüne Taste **Stop/Start**
- ☛ Es erscheint die Anzeige „**Stattdessen ausschleichen?**“, wählen Sie „**Nein**“
- ☛ Es erscheint die Anzeige „**Pumpe stoppen?**“, wählen Sie „**Ja**“
- ☛ Zum Ausschalten der Pumpe drücken Sie den Netzschalter; es erscheint die Anzeige „**Ausschalten?**“, wählen Sie „**Ja**“

Wenn die Pumpe während der Laufzeit gestoppt wurde und wieder gestartet wird erscheint die Anzeige „**Unterbrochene Infusion abschließen oder mit neuem Beutel beginnen?**“, wählen Sie „**beenden**“ um eine begonnene Infusion/Therapie weiterlaufen zu lassen oder „**Neue Infusion**“ wenn sie mit einem neuen Beutel von vorne beginnen wollen.

## 3. Änderungen der Zufuhreinstellungen

- ☛ Wählen Sie „Optionen“ (auf dem Display rechts unten) und drücken Sie die Pfeiltasten auf dem Bedienfeld nach unten bis zu „**Zufuhreinstellungen anzeigen**“, drücken sie „**wählen**“
- ☛ Blättern Sie nun mittels der Pfeiltasten auf die Einstellung welche verändert werden soll; z.B. „Dauer der Infusion“, anschließend drücken Sie die Taste „**wählen**“.  
Folgende Einstellungen sind verfügbar:
  - Infusionsvolumen: Menge des Beutels die einlaufen soll; entspricht immer 20ml weniger als der Reservoir Inhalt (für KVO Rate)
  - Einschleichen: immer auf 0 ml
  - Ausschleichen: immer auf 0 ml
  - Dauer der Infusion: Laufzeit in Stunden
  - Plateaurate: Laufrate in Stunden
  - KVO Rate: immer 5 ml
  - Reservoir Volumen: Beutelinhalt
- ☛ Es erscheint die Anzeige „**Zum Fortfahren Code eingeben**“, geben Sie den **Code 212** mit Hilfe der Pfeiltasten ein. (Jede Zahl muss nach der Eingabe mit der Taste „**wählen**“ bestätigt werden.)

- ✎ Korrigieren Sie nun den Wert mit den Pfeiltasten nach oben oder unten, drücken Sie anschließend **„speichern“** (rechter unterer Bereich des Displays)
- ✎ Drücken Sie die rot/grüne Taste **Start/Stop** auf der Pumpe.
- ✎ Es erscheint die Anzeige **„Pumpeneinstellungen überprüfen“**
- ✎ Drücken Sie nun **„Wert speichern“** bis vor jeder Einstellung ein Haken ist, anschließend erscheint die Anzeige **„Pumpe starten“**, wählen Sie **„Nein“** und drücken Sie danach zweimal **„zurück“** um in den Startbildschirm zu gelangen.

## 4. Handhabung für den Akku der CADD-Solis VIP

- ✎ Zum Betrieb der Pumpe sind 4 AA Alkali-Batterien (kein Lithium, keine wieder aufladbaren Batterien) oder der wieder aufladbare CADD Akku erforderlich.
- ✎ Zum Einlegen der Batterien bzw. des Akkus muss die Verriegelung des Akkufachs auf der Pumpenoberseite gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden und geöffnet werden.
- ✎ Batterien bzw. Akku einsetzen und die Verriegelung des Batteriefachs mit dem Uhrzeigersinn verschließen.
- ✎ Vor der Verwendung muss der Akku aufgeladen werden. Dies dauert ca. **4 Stunden**
- ✎ Der Akku kann außerhalb, oder in der Pumpe mittels des Netzsteckers aufgeladen werden.
- ✎ Der Ladezustand des Akkus wird im oberen rechten Displaybereich der Pumpe angezeigt.

Diese Kurzanleitung wurde unter Einbeziehung der Gebrauchsanleitung von Smith Medical erstellt und ist ausschließlich für den internen Gebrauch zu verwenden. Eine Kopie oder unautorisierte Weitergabe ist nicht gestattet. Sie dient lediglich der Orientierung und ersetzt nicht die originale Gebrauchsanweisung.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne montags bis donnerstags von 8:00 bis 16:30 Uhr sowie freitags von 8:00 bis 15:30 Uhr unter der **0621 30980960** zur Verfügung. In dringenden Fällen können Sie unsere Rufbereitschaft unter der Telefonnummer **0174 8584864** kontaktieren.